



Wundkonzept

Stand Januar 2026
Version 1.0



Weniger Tage mit Wunden.

Coloplast hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Menschen mit chronischen Wunden zu erleichtern.

Den schnellsten Weg zur Wundheilung zu finden, kann eine Herausforderung sein. Stellen Sie sicher, dass die Ursache der Wunde ermittelt und eine vollständige Patienten- und Wundbeurteilung durchgeführt wird.



Inhaltsverzeichnis

- 4 Coloplast Wund-Dreieck
- 5 Der Coloplast Wundberg
- 6 Lokale Therapie in der Wundversorgung
- 8 Produktlistung
- 18 Richtlinien für eine fachgerechte Wundversorgung
- 26 Bestellprozess & MiGeL-Verrechnung
- 28 Coloplast Professional
- 29 Unsere Kanäle
- 30 Bestellzettel

Das Coloplast Wund-Dreieck – ein intuitives Konzept zur einfachen Wundbeurteilung.

Coloplast hat weltweit viele Fachkräfte danach befragt, welche Faktoren neben den ganzheitlichen Aspekten der Wundursache und den Patientenbedürfnissen bei der lokalen Wundbeurteilung am wichtigsten sind.

Die Antwort war eindeutig: **Wundgrund, Wundrand und Wundumgebung.** Denn alle drei Punkte tragen entscheidend zur Wundheilung bei.

Wundgrund

Klinisch relevantes Ziel im Wundgrund ist die Abwesenheit von Infektion, ein optimal feuchtes Wundmilieu und die Bildung von Granulationsgewebe. Der Wundberg zeigt je nach Wundstadium phasengerechte Handlungsoptionen an.

Ein wichtiger Faktor zum Schutz der wundumgebenden Haut ist die Auswahl eines Verbandes mit geeigneter Haftung. Die Biatain® Schaumverbände bieten daher für jeden Hauttyp geeignete Haftarten.

Wundrand


Der Wundrand sollte vor Störfaktoren, wie z. B. Mazeration und Nekrosen, geschützt werden. Biatain® Schaumverbände schützen den Wundrand durch eine exzellente Absorption und ihre Wölbung zum Wundgrund.

Wundumgebung

Bei der wundumgebenden Haut wird eine gesunde, von Mazeration und Irritation freie Haut angestrebt. Auch trockene Haut und Hyperkeratosen sollten erfasst und behandelt werden.



Der Coloplast Wundberg

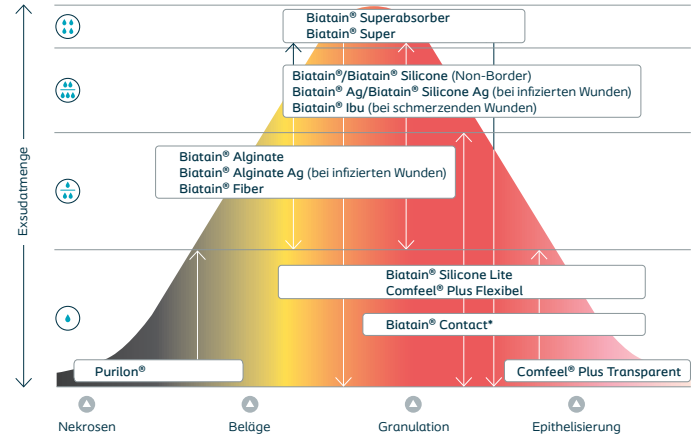

*Exsudataufnahmekapazität ist abhängig vom Sekundärverband.

□ Wundheilungsphase ⊕ Exsudatlevel

Gemäß den Eckpunkten des Wund-Dreiecks sind die Beurteilung des Wundgrundes sowie die daraus abgeleiteten Behandlungsoptionen wichtige Bestandteile des lokalen Wundmanagements.

Bei der Verbandauswahl sollten sowohl die Menge des austretenden Exsudates als auch die Wundheilungsphase berücksichtigt werden. Zusätzlich sollten bei hoher bakterieller Belastung und auftretendem Wundschmerz entsprechende topische und/oder systemische Therapien eingeleitet werden.

Der Coloplast Wundberg bietet eine Orientierungshilfe zu den Einsatzgebieten der einzelnen Verbände.





Scannen Sie den QR-Code für weitere Hinweise zur Wundbehandlung

Lokale Therapie in der Wundversorgung

*Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge erforderlich
 **Tiefe Wunden mit Biatain® Alginate Verband locker füllen und darauf achten, dass der Verband nicht über den Wundrand hinausragt.

Exsudatmenge

sehr stark ●●●●

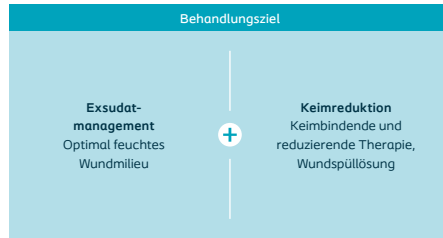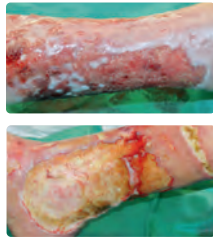


Produktempfehlung




Exsudatmenge

mittel – stark ●●○○○ – ●●●○○

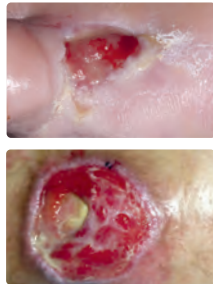


Produktempfehlung

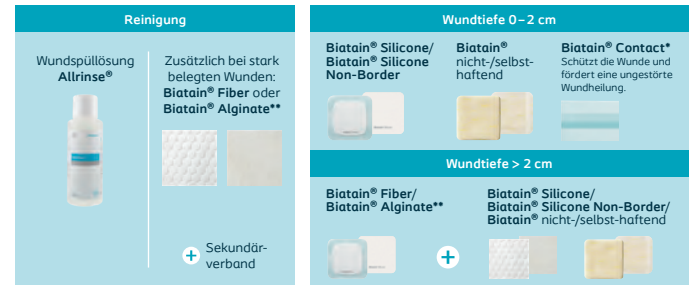


Exsudatmenge



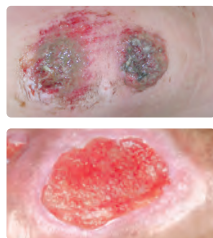

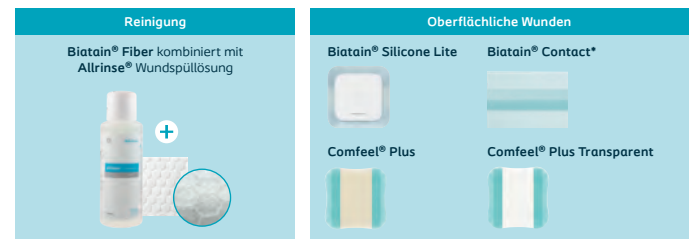

leicht – mittel ●○○○ – ●●○○






Produktempfehlung



Die wichtigsten Richtlinien für eine fachgerechte Wundversorgung – im Überblick.

-  Prüfen Sie stets die Ursache der Wunde.
-  Folgen Sie den lokalen Richtlinien zur Infektionskontrolle, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.
-  Verwenden Sie nur sterile und scharfe Scheren für den Verbandzuschnitt.
-  Zum Schutz der umgebenden Haut kann ein Hautschutz verwendet werden.
-  Zumeist empfehlen Hersteller, den Verband zentral auf der Wunde zu applizieren. Bedenken Sie die Fließrichtung des Exsudates.
-  Nach einem Verbandzuschnitt sollten etwaige Ecken abgerundet werden, damit der Verband besser haften kann.

-  Bei haftenden Verbänden sollte die Schutzfolie erst nach Zuschnitt des Verbands abgezogen werden, damit der Zuschnitt erleichtert wird.
-  Legen Sie Verbände ohne Spannung an, da dies zu Blasen führen kann.
-  Obwohl einige Verbände Polster zur Vermeidung von Reibung besitzen, sind zusätzlich druckentlastende Massnahmen zu ergreifen.



Für mehr Infos
QR-Code scannen

Er führt Sie zu unserem **WundWeg-Weiser** – In 5 Schritten zur Wundheilung.

Comfeel® Plus Transparent



Biatain® Silicone Non-Border



Für mehr Infos
QR-Code scannen

Er führt Sie zu unserem **Cutting Guide** mit einer Vielzahl von weiteren Zuschneidetipps zur optimalen Wundversorgung.



Bestellprozess & MiGeL-Verrechnung

Vereinfachter Bestellprozess

So einfach bestellen Sie MiGeL-Produkte: Den Strichcode auf der Packung scannen und die Daten werden an den Zur Rose-Shop übermittelt. WEBSTAR liefert das medizinische Verbrauchsmaterial auf Bewohner und Bewohnerinnen konfektioniert zum vereinbarten Liefertag an die definierte Station. Sie sparen sich das Zusammensuchen des Materials im Zentrallager.

MiGeL-Service mit Zur Rose

Dank WEBSTARs Zusammenarbeit mit der Apotheke Zur Rose brauchen Sie sich nicht mehr um Abrechnungen und Rückweisungen von MiGeL-B-Produkten zu kümmern: Zur Rose verrechnet sämtliche MiGeL-Produkte von WEBSTAR direkt mit den Krankenkassen. Sie sparen sich die Verbrauchserfassung pro Bewohner sowie die individuelle Verrechnung, haben HVB-konforme Preise und können mehr Zeit in pflegerische Leistungen investieren.

Tipp für Bestellungen

Nutzen Sie die Bestellzettel am Ende der Broschüre, um Ihre Bestellung ganz bequem zu tätigen.

Coloplast Services

Wir bieten Ihnen als Kunde und medizinische Fachperson verschiedene Services rund um die Wundversorgung an.

Unser Team wird für Sie aktiv. Wir sind mit unseren Services für Sie da.

Weiterbildungen

- › Interne Schulungen
- › Basic Wound Care Seminar

Ratgeber & Tools

- › WundWegWeiser
- › Ratgeber für innovative Verbandstechniken
- › Coloplast Professional Website

Wundvisite

- › Beratungen



 **Coloplast | Professional**

Neue Wissensplattform für medizinische Fachpersonen

Ganz einfach QR-Code scannen oder über den Kurzlink de.coloplast.ch/wundversorgung zur Website.



Grundausrüstung

Produktvorschlag Wundkonzept

Schaumverbände mit 3DFit® Technologie ohne & mit Wirkstoff

Artikel	Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharmacode
Biatain® Schaumverband nicht-haftend				
Biatain® Non Adhesive	23343	5 x 7	10	5395084
Biatain® Non Adhesive	23344	10 x 10	10	5395090
Biatain® Ag Non Adhesive	22812	5 x 7	5	5397812
Biatain® Ag Non Adhesive	22813	10 x 10	5	7450893

Biatain® Schaumverband selbst-haftend				
Biatain® Adhesive	41557	12,5 x 12,5	10	5397539
Biatain® Adhesive	41559	17 x 17	5	5397551
Biatain® Adhesive	41562	23 x 23	5	5397568

Biatain® Silicone Schaumverband mit Silikonhafrand				
Biatain® Silicone	22801	7,5 x 7,5	10	4671582
Biatain® Silicone	22802	10 x 10	10	4684538
Biatain® Silicone*	22803	12,5 x 12,5	10	4671599
Biatain® Silicone	38836	14 x 19,5	5	6662920
Biatain® Silicone (Sakrum)	38838	15 x 19	5	6662883
Biatain® Silicone (Sakrum)	41574	25 x 25	5	6662908
Biatain® Silicone (Heel)	38834	18 x 18	5	6662920
Biatain® Silicone Ag	41516	7,5 x 7,5	5	5604501
Biatain® Silicone Ag	41521	10 x 10	5	5604493

Biatain® Silicone Lite Schaumverband mit Silikonhafrand				
Biatain® Silicone Lite	38822	5 x 5	5	6444784
Biatain® Silicone Lite	22804	7,5 x 7,5	10	5535987
Biatain® Silicone Lite	22805	10 x 10	10	5535970
Biatain® Silicone Lite	41576	5 x 12,5	5	6444790

Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband ohne Silikonhafrand				
Biatain® Silicone Non-Border	41525	5 x 7,5	10	7766826
Biatain® Silicone Non-Border*	41548	10 x 10	10	7766828

* Empfohlener Vorratsartikel

Jetzt abonnieren

Unsere Kanäle



Facebook
Coloplast Wundversorgung
facebook.com/ColoplastWundversorgung



Podcast
heilmaleins der Wunde
de.coloplast.ch/podcast



Instagram
heilmaleins.by.coloplast
instagram.com/heilmaleins.by.coloplast



Newsletter
heilmaleins der Wunde
de.coloplast.ch/newsletter



Youtube
ColoplastDE
youtube.com/ColoplastDE1



- ⊙ Kostenlose Musterbestellungen
- ⊙ Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- ⊙ Fallstudien und klinische Videos
- ⊙ Vieles mehr zum Wundwissen
coloplastprofessional.ch

Superabsorber

Artikel	Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharmacode
Biatain® Superabsorber nicht haftend				
Biatain® Superabsorber Non-Adhesive	44664	7,5 × 7,5	10	1122367
Biatain® Superabsorber Non-Adhesive	44663	12 × 12	10	1122368
Biatain® Superabsorber Non-Adhesive	44661	15 × 15	10	1122370

Alginate ohne & mit Wirkstoff

Biatain® Alginatkomresse/Tamponade

Biatain® Alginate	22807	5 × 5	10	7795531
Biatain® Alginate (Tamponade)	22809	3 × 44	5	7795527
Biatain® Alginate Ag	22814	5 × 5	10	7795532
Biatain® Alginate Ag	41550	10 × 10	10	7795528

Gelierende Faserverbände mit HexaLock® Technologie

Biatain® Fiber Gelierender Faserverband

Biatain® Fiber*	38837	5 × 5	10	7749047
Biatain® Fiber	38871	10 × 10	10	7749048

Silikonwunddistanzgitter

Biatain® Contact – Silikonwunddistanzgitter

Biatain® Contact*	41551	5 × 7,5	5	7741250
Biatain® Contact	38835	7,5 × 10	5	7741251
Biatain® Contact	38842	10 × 18	5	7741252

Wundspüllösung

Allrinse® Wundspüllösung

Allrinse® Wundspüllösung* Flasche	44601	500 ml	1	1118725
Allrinse® Wundspüllösung Spray	44602	500 ml	1	1110080

Hydrokolloide

Artikel	Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharmacode
Comfeel® Plus Transparenter Wundverband				
Comfeel® Plus Transparent	20779	5 × 7	10	6823470
Comfeel® Plus Transparent	20780	10 × 10	10	6823493
Comfeel® Plus Transparent	38882	5 × 15	5	6823518
Comfeel® Plus Transparent	38839	15 × 20	5	6823501

Comfeel® Plus Flexibler Wundverband

Comfeel® Plus	45316	10 × 10	10	1834718
---------------	-------	---------	----	---------

Hydrogel

Purilon® Gel

Purilon® Gel	23437	8g	10	2175695
--------------	-------	----	----	---------

Hautfaltenmanagement

InterDry®

InterDry® Rolle	40274	25 × 366	1	7674316
-----------------	-------	----------	---	---------

Weitere Produkte

Verbands-Set*	32506,9		1	1128699
Schlauchverband <small>Army/Bein</small>	40247	20m	1	2185386
Schlauchverband <small>Oberschenkel/Kopf</small>	40248	20m	1	2192937
Fixierbinde	40219	6 cm x 4m	1	5142041
Fixierbinde	40220	8 cm x 4m	1	5142093
Fixierbinde	41092	10 cm x 4m	1	5142087
Fixierbinde kohäsive*	40216	6 cm x 4m	1	2185274
Fixierbinde kohäsive	40217	8 cm x 4m	1	2185280
Fixierbinde kohäsive	40218	10 cm x 4m	1	2185297
Fixierpflaster Rolle*	38212	5 cm x 5m	1	7051383
Fixierpflaster Rolle	38213	10 cm x 2m	1	7051420

* Empfohlener Vorratsartikel

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwender:innen finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege, die Urologie und die Laryngektomie- und Tracheostomieversorgung. Darüber hinaus bieten wir in Deutschland auch Homecare-Dienstleistungen an.

Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 16.500 Mitarbeiter:innen, Niederlassungen in 40 Ländern und helfen Menschen in mehr als 140 Ländern mit unseren Produkten.

Coloplast AG, Euro-Business-Center, Blegistrasse 1, CH-6343 Rotkreuz
Tel. +41 41 79979-79, swissinfo@coloplast.com



WEBSTAR
Industriestrasse 28
CH - 8157 Dielsdorf

Telefon +41 44 870 87 00
E-Mail info@webstar.ch
Web www.webstar.ch